

3531 - MACHO P/ BRINCO C/ PONTA METÁLICA AMARELO WALMUR
3881 - MACHO P/ BRINCO C/ PONTA METÁLICA AZUL

INSTRUÇÕES:

- 1 – Insira o macho do brinco na agulha do aplicador de brincos.
- 2 – Insira a parte fêmea do brinco por baixo de lingueta do aplicador WALMUR.
- 3 – Limpe a parte central da orelha do animal com desinfetante diluído.
- 4 – Aplique na ponta do macho do brinco uma pasta anticéptica ou mergulhe o brinco em solução desinfetante.
- 5 – Aplique o brinco na parte central da orelha, entre as nervuras superior e inferior, apertando o alicate em um único movimento firme.
- 6 – Após retirar o aplicador, confira o encaixe entre as partes, e verifique que a orelha não fique comprimida para permitir boa cicatrização e aeração, evitando o esmagamento.